

CLARIONMASK <b>REF</b>	..CLG.../3VR/clg...
UTILIZAR:	8 HORAS AL DÍA
FRECUENCIA DE LAVADO:	1 LAVADO CADA 7 DÍAS
NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS:	30 VECES
EFICACIA:	210 DÍAS (1 LAVADO CADA 7 DÍAS 30 VECES)



### **MASCARILLA QUIRÚRGICA DE TIPO II**

Destinada a limitar la transmisión de agentes infecciosos entre personas, pacientes y personal clínico y sus alrededores.

Rendimiento de ClarionMask:

- **Eficiencia de filtrado (B.F.E.):** > 98%
- **Resistencia al flujo respiratorio:** < 17 Pa/cm<sup>2</sup>

Cinco capas de tela:

- 1º capa exterior de color: 100% algodón
- 2º/3º/4º capas intermedias de filtrado: 3 capas superpuestas de fibrillas de polipropileno
- 5º capa interior (en contacto con la cara): 100% algodón

### **TECNOLOGIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA TELA UTILIZADA**

La tela utilizada para elaborar el producto es tratada por **Livinguard AG, Bahnhofstrasse 12, 6300 Zug, Suiza**, con la fórmula exclusiva de Livinguard Technology, que inhibe mecánicamente la actividad de bacterias y virus y previene su proliferación (eliminándolos de la superficie) ; asegurando una protección prolongada y eficaz del riesgo de contaminación.

Livinguard declara y certifica:

- **Capacidad para inactivar el virus:** 99,9%

Protected By Livinguard: [www.livinguard.com](http://www.livinguard.com)

### **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

Para uso exclusivamente personal. No utilizar si el dispositivo resulta dañado. No utilizar en caso de hipersensibilidad a los componentes.

### **REEMPLAZO**

El producto debe ser reemplazado después de un año desde la fecha de producción indicada sobre la confección y cuando se agotan los lavados máximos. El producto usado debe eliminarse con respecto a las normas sobre el reglamento selectivo de residuos sólidos.

### **MODALIDAD DE EMPLEO**

LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES TIENEN QUE SER RESPETADAS CON ATENCIÓN CADA VEZ QUE SE USA LA MASCARILLA

1. Abrir el paquete y sacar la mascarilla.
2. Colocar la mascarilla en una mano y pegarla al rostro.
3. Pasar las bandas elásticas detrás de cada oreja para que se ajusta cómodamente la máscara al perfil de la cara y use los ajustadores para estirar los elásticos (la parte superior de cada elástico - entre la máscara y el regulador - debe ser más corto que eso más bajo, para asegurar un mejor agarre).
4. Adaptarse la placa del puente nasal para que se ajuste a la parte superior del perfil de la nariz.
5. Adaptarse la parte de abajo de la mascarilla para que cubra la barbilla por entero.
6. El producto se considera para uso personal y, también después del lavado, no puede ser utilizado por personas que no sea el primer utilizador.

Es recomendable dejar la mascarilla en un lugar seco y alejado de fuentes de calor; lavarse las manos después de tocar o lavar la mascarilla para evitar la contaminación cruzada.

### **USO, CONSERVACION Y VALIDEZ DE LOS PRODUCTOS**

Antes de utilizar la mascarilla por primera vez, asegurarse de que la confección sea intacta y cerrada y que el producto sea completo y sea adecuado para la aplicación.

Para usos ulteriores, asegurarse que, previamente, el producto haya sido tratado según las instrucciones proporcionadas y almacenado en un ambiente saludable alejado de fuentes de calor muy elevadas, con una temperatura entre - 10 ° C y + 40 ° C y humedad relativa inferior del 80%.

Tiempo máximo de empleo diario: 8 horas.

Frecuencia de lavado: cada 7 días, a menos de distintas necesidades

Lavados máximos: 30 lavados

Método de lavado: a mano en agua corriente fría (máx. 30 °) sin ningún detergente y sin escurrir, no secar a la luz solar directa. No utilizar la secadora ni plancha.

Para que no se afecte la eficacia de filtración del producto, no manipular, sustituir o dañar alguna parte de los mismos.



### **CLARION LIVING SRL**

Piazza Martiri della Libertà n. 4 - 28100 Novara (NO) - ITALIA

Tel: +39 0321 629249 - Fax: +39 0321 393720

Partita IVA e C.F.: 02631140031

Pec: [clarionlivingsrl@pec.it](mailto:clarionlivingsrl@pec.it) - Email: [info@clarion-living.com](mailto:info@clarion-living.com)

Website: [www.clarion-living.com](http://www.clarion-living.com)

